

MEDVOX

Para pacientes que não podem falar, mas têm muito a dizer.



www.tmed.com.br | tmed@tmed.com.br

T MED[®]
TECNOLOGIA MÉDICA

MEDVOX - COMUNICAÇÃO DIRETA COM O PACIENTE AFÁSICO

Este aparelho atua como um interlocutor entre o paciente com dificuldade de fala e o profissional de saúde ou o acompanhante. Possibilita a vocalização de palavras através do simples acionamento de teclas pelos usuários e pode ser utilizado em várias áreas clínico-terapêuticas. Indicado para hospitais, clínicas, residências e similares.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ACOMPANHA O MEDVOX:

- 01 Eliminador/carregador de baterias (12 volts);
- 01 Conjunto de baterias recarregáveis (já instalado no interior do MEDVOX)

DADOS TÉCNICOS:

- Sistema eletrônico micro-controlado;
- Invólucro em poliestireno de alto impacto;
- Teclado-membrana de baixo esforço;
- Tensão de alimentação: 9 a 12 VDC;
- Eliminador/carregador:
- tensão de entrada: 110 ou 220 VAC;
- tensão de saída: 12 VDC;
- plugue P4 de contato externo positivo e interno negativo;
- Dimensões: 36 cm x 7,5 cm x 23 cm;
- Peso: 1,2 kg

INSTALAÇÃO

O MEDVOX sai de fábrica com as baterias descarregadas, devendo-se carregá-las da seguinte forma:

- Ligue o eliminador/carregador à tomada (certifique-se antes que a tensão de entrada selecionada está de acordo com a da sua rede elétrica);
- Insira o plugue do eliminador/carregador no conector localizado na lateral do MEDVOX. Com isto, a luz amarela acenderá indicando que a recarga está em ação.

Obs.: Normalmente, com 8 horas de carga as baterias atingem seu nível máximo e a luz amarela apaga. Porém, caso necessite utilizar o MEDVOX antes de atingida a carga plena, o eliminador/carregador terá de ser desplugado do mesmo, devendo, após o uso, ser replugado para dar continuidade à recarga das baterias.

OPERAÇÃO:

1 - O MEDVOX deve ser ligado ou desligado, através do acionamento da tecla "liga/desliga";

Obs.: O MEDVOX está equipado com o sistema Auto Power Off. Estando ligado após 3 minutos sem uso, ele desliga automaticamente, preservando assim a carga das baterias.

2 - Luz vermelha acesa - indica que as baterias estão necessitando de recarga;

3 - Luz amarela acesa - indica que as baterias estão sendo recarregadas;

Obs.: Esta luz só acende durante a recarga das baterias. Apagando automaticamente, quando atingida a carga plena.

4 - Luz verde acesa – indica que o MEDVOX está ligado e pronto para uso;

5 - Controle de volume - quando as teclas para controle do volume são acionadas emitem "feedback auditivo" através de rápidos clicks, indicando que o nível do volume do som está sendo aumentado (+) ou diminuído (-). O MEDVOX oferece quatro níveis de volume e, a cada vez que é ligado, o mesmo se ajusta automaticamente no volume médio.

6 - Para escolher entre a opção de voz masculina ou feminina, siga os seguintes passos:

a) Ligue o MEDVOX pressionando a tecla LIGA/DESLIGA;

b) Pressione novamente a tecla LIGA/DESLIGA e, mantendo a mesma pressionada pressione a tecla MÃE para escolher a voz feminina ou PAI para escolher a voz masculina;

OBS: Esta configuração é gravada na memória e portanto, dependendo da seleção, se tornará o padrão toda vez que o MEDVOX for ligado.



CUIDADOS NO MANUSEIO, ARMAZENAGEM E LIMPEZA DO PRODUTO:

- Ao receber o MEDVOX, faça a inspeção visual e técnica, verificando se as especificações e o funcionamento estão de acordo com o produto adquirido;

- Armazene o MEDVOX em ambientes protegidos do sol e chuva, em local seco e na posição horizontal, com a superfície do teclado voltada para cima, ou então, na posição vertical sendo preso pela alça;

- Não utilize ferramentas ou objetos pontiagudos para pressionar as teclas. Não apoie objetos sobre a superfície do teclado;

- Não utilize, para limpeza, produtos químicos como álcool, ácidos, pastas abrasivas, ferramentas metálicas, palhas de aço ou saponáceos. Limpe apenas com pano levemente umedecido;

Leia atentamente as instruções contidas no manual técnico.

Em caso de dúvidas ou reclamações, entre em contato com o representante MEDVOX de sua região ou através do fone: + 55 81 3366.9100 | e-mail: sac@tmed.com.br



MATRIZ - Recife
Fone: +55 81 3366.9100
Fax: +55 81 3366.9101

FILIAL - São Paulo
Fone/Fax: +55 11 3938.9100

